

PRODUKTDATABLAD

GlucoMen® Areo blodsukkerapparat

GlucoMen® Areo blodsukkerapparat er et smart lille apparat, hvor det er muligt at overføre data fra GlucoMen® Areo til smartphone og tablet. Resultatet kan sendes via e-mail og SMS. Data kan overføres via NFC til Smartphones, Windows telefoner, tablets og PC.

Blodet suges hurtigt fra spidsen af teststrimlen og målingen starter først, når der er blod nok på strimlen.

Leveres som startsæt med fingerprikker, 10 teststrimler, 10 lancetter og etui. Beholderen med teststrimler er let oplukkelig.

Der er mulighed for at markere måleresultat som før og efter måltid. Det er også muligt at markere sport. Der kan indstilles 3 påmindelses-alarmer.

GlucoMen Areo er kompatibel både med Apple og Android og kan trådløst overføre data via NFC til henholdsvis app'en GlucoLog Lite og den nye danske CE-godkendte app Hedia.

Med GlucoMen Areo og Hedia bliver det nu muligt at få anbefalet hvor meget insulin eller kulhydrat diabetikeren har brug for. Derudover kan man indtaste selve intensiteten af den sport der udføres og på den måde tager Hedia hensyn til alt det, der påvirker blodsukkerniveauet.

Begge målere kan stadig aflæses i Diasend på hospitalet.



Måleområde:	1,1 – 33,3 mmol/l
Kodes/kalibreres:	Automatisk
Hukommelse:	730 målinger med dato og tid
Måletid:	5 sekunder
Gennemsnit:	1, 7, 14, 30, 60 og 90 dage
Blodmængde:	0,5 µl
Teststrimmel:	Æske a 2 x 25 stk.
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/IVD IIb

PRODUKTDATABLAD

Glucomen® Areo blodsukkerapparat

Steril vare/metode:	Nej for apparat og fingerprikker/ja for lancetter - bestråling.
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Holdbarhed fra produktionen:	24 måneder - baseret på teststrimlernes udløb.
Holdbarhed teststrimler efter åbning:	12 måneder
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Blodet suges fra:	Spidsen af teststrimlen
Blodketon:	Nej
Genopfyldning af teststrimmel:	Nej
Levetid/garanti:	2 år
Trådløs overførsel til anden enhed:	Ja
Tal størrelse på display:	1,7 cm
Automatisk alarm hændelser:	Ja, 3 påmindelses alarmer samt Hypo og Hyper alarm
Batchnummer:	Ja
Måleresultatet afhængig af rengøringen af blodsukkerapparatet:	Nej
Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Apparat mål:	8,55 x 5,6 x 1,82 cm
Taske størrelse:	13,5 x 11 cm
Opbevaring for måleren:	-20 °C til +50 °C
Apparatets drift temperatur:	+5 °C til +45 °C
Måltidsmarkering:	Ja, før og efter måltid
Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:	Ja
Lys i strimmelport:	Nej
Batteri:	2 stk. 3V CR2032 batteri (1000 tests)
Data overføres til PC:	Ja
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Teststrimler som passer til apparatet:	6407061 Glucomen Areo teststrimler

PRODUKTDATABLAD

GlucoMen® Areo blodsukkerapparat

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6407060	GlucoMen	Areo blodsukkerapparat, startsæt	1 stk.	46212